

CODICE AC 155 CLAMP POLIFUNZIONE A FORBICE

Dispositivo medico di classe I non sterile.

**Descrizione del prodotto/Utilizzo**

La Clamp Polifunzione è utilizzabile per diversi impieghi di tipo medico.

Il suo principale utilizzo consiste nell'essere un mezzo per afferrare garze e tamponi durante operazioni di medicazione generica

Utilizzabile anche come fermateli

La chiusura della Clamp è assicurata e mantenuta da un aggancio posto nel punto di contatto dei due anelli per l'impugnatura. L'attacco è costituito da due lembi di plastica dotati entrambi di incavi per poter agganciare il dispositivo in diverse posizioni. In base alla posizione scelta viene esercitata sul tubo o sul materiale raccolto una pressione diversa, minore nei primi agganci e maggiore nelle ultime posizioni.

Realizzata in Nylon caricata 30% fibra vetro. Latex free. Non contiene ftalati

Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma (fino a 25kGy); Vapore (ciclo a 125° per 20 minuti)

Avvertenze e precauzioni

- Dopo aver fissato il dispositivo, esercitare una leggera forza di apertura verso l'esterno per verificare la tenuta dell'aggancio.
- Per evitare qualsiasi tipo di rischio biologico durante l'utilizzo del dispositivo, indossare i guanti di protezione.
- Gettare sempre dopo l'uso.
- Se l'utilizzo è diverso da quello indicato, è l'acquirente il solo responsabile per la scelta, l'adeguatezza e l'uso di questo prodotto.
- È necessario che l'utilizzatore e/o il paziente segnalino qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato in cui l'utilizzatore e/o paziente è stabilito.**

Effetti collaterali

Non sono stati riscontrati particolari effetti collaterali dovuti all'utilizzo del prodotto.

Non sono segnalate interferenze o rischi per uso congiunto con altri dispositivi.

Smaltimento

L'eliminazione del dispositivo utilizzato richiede lo smaltimento come "Rifiuto ospedaliero potenzialmente contaminato".

I RISCHI PER IL PAZIENTE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DEL DISPOSITIVO: SONO QUELLI DI INFEZIONI E CONTAMINAZIONI CROCIATE, COMPLICANZE INFETTIVE SOTTOFORMA DI INFEZIONI LOCALI E INFEZIONI SISTEMICHE,

Conservazione e manipolazione

Conservare i dispositivi in ambienti asciutti e puliti e lontano da fonti di calore dirette.

Sostituire il dispositivo qualora non si presentasse completamente integro.



ATTENZIONE : LEGGERE LE AVVERTENZE E PRECAUZIONI



LATEX FREE



MONOUSO



DATA DI FABBRICAZIONE



DATA DI SCADENZA



NON STERILE



FABBRICANTE



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO



DEHP NON CONTIENE FTALATI



DISPOSITIVO MEDICO

Fabbricato da:

SA.GE Srl - Via Montale 110 – 41032 Cavezzo (MO) Italia
info@sage-srl.com – www.sage-srl.com